

Tableau de consultation rapide Maximiser la connectivité mobile



Remarque: Veuillez communiquer avec le RASC^{MD} au 1-800-267-2726 pour de l'assistance.

Le câble ethernet doit être déconnecté lorsque vous essayez de vous connecter à n'importe quel wifi, mifi ou point d'accès

ASSUREZ-VOUS QUE VOUS AVEC UN SIGNAL LTE PUISSANT

C'est une bonne idée de faire des recherches de la zone dans laquelle vous utiliserez votre point d'accès. Il existe des emplacements qui ne prennent pas en charge la 4G / LTE cellulaire, ce qui signifie que vous aurez toujours Internet, mais à des vitesses plus lentes.

Afin d'assurer un bon fonctionnement, assurez-vous que votre appareil émetteur est connecté à un signal cellulaire fort III et LTE. Notez que la force du signal cellulaire peut varier d'une zone à l'autre.

ATTENTION À LA CONGESTION WIFI

Si vous vous trouvez dans un endroit qui a de nombreux réseaux wifi à portée, cela peut provoquer des conflits, des ralentissements et l'incapacité de trouver un point d'accès.



EMPLACEMENT ET PORTÉE

Les sous-sols, les structures en béton et en métal affectent négativement les signaux wifi et cellulaires. Être près d'une fenêtre PEUT améliorer la connexion. L'ouverture de cette fenêtre PEUT améliorer encore cette connexion. En règle générale, la meilleure portée pour l'appareil que vous utilisez pour votre connexion hotspot est de 1 à 2 mètres.



ÉVITEZ L'UTILISATION MULTIMÉDIA

Fermez toutes les applications de votre appareil (téléphone ou tablette) pour vous assurer qu'aucun autre service n'utilise de données.

EFFECTUER UN TEST DE VITESSE (SPEEDTEST.NET OU APP)

- Une connextion descendante de 10Mo est bien
- Une connextion croissante de 5Mo est bien
- Rien de moins que ceux-ci peuvent rendre la connexion lente

HLS Therapeutics Inc. 10 Carlson Court, Suite 701 Etobicoke, Ontario M9W 6L2 CLOZARIL, RASC et RASC Portail de soins aux patients et sa conception sont des marques déposées de Novariis AG. Pronto est une marque déposée de HLS Therapeutics Inc. Tous droits réservés.@2021 HLS TherapeuticsInc. mai 2021 MLR NS 20210514 F COM

















LOCALISER UN POINT D'ACCÈS

Si le point d'accès est introuvable, suivez les étapes ci-dessous dans l'ordre:

- Essayez de déplacer l'appareil RASC^{MD} Pronto^{MD} vers un autre emplacement, même une Α. pièce adjacente ou de l'autre côté d'une grande pièce
- Β. Essayez d'éteindre le point d'accès, attendez 10 secondes, rallumez-le, attendez 10 secondes et essayez la connexion
 - i. Si vous utilisez un téléphone mobile ou une tablette, accédez à l'écran du point d'accès dans les paramètres et restez-y tout en essayant de vous connecter
- C. Essayez un redémarrage:
 - Eteignez le point d'accès (éteignez complètement) ii.
 - Débranchez l'adapteur de l'appareil RASC^{MD} Pronto^{MD} de la source d'alimentation iii.
 - Attendre 10 secondes iv.
 - Allumez le point d'accès v.
 - Attendez que le périphérique hotspot soit allumé et à l'écran principal (si vous utilisez vi. un téléphone mobile ou une tablette, accédez à l'écran du point d'accès dans les réglages et demeurer sur l'écran tout en essayant de vous connecter)
 - Branchez l'appareil RASC^{MD} Pronto^{MD} sur une source d'alimentation et attendez que le vii. voyant LED de l'appareil devienne VERT. Si le voyant LED de l'appareil est ORANGE, il n'est pas connecté à un réseau
 - viii. Réessayez votre connextion

CONSEIL

Connectez d'abord un appareil fiable au point d'accès, puis associez le RASC^{MD} Pronto^{MC} à l'aide de l'application RASC^{MD} Pronto^{MD}

ACTUALISER POUR LES RÉSEAUX WIFI

Lors de la recherche de réseaux wifi, vous devrez peut-être ACTUALISER à plusieurs reprises pour qu'il apparaisse dans la liste (5 à 10 fois).



- 1. Ouvrez le **portail soins aux patients RASC^{MD}** via le navigateur Internet de votre appareil mobile et connectez-vous avec vos informations d'identification.
- 2. Suivez les étapes habituelles pour exécuter un test RASC^{MD} Pronto^{MD}.
- Une fois le test terminé, nous vous recommandons de désactiver le point d'accès mobile sur votre appareil.

