

**1 ACCÈS AU PORTAIL DE SOINS AUX PATIENTS RASC<sup>MD</sup> SITE DE PRODUCTION**

Rendez-vous sur [www.clozaril.ca](http://www.clozaril.ca) pour accéder à la page de connexion du Portail de soins aux patients RASC<sup>MD</sup> site de production.



**2 NOM D'UTILISATEUR ET MOT DE PASSE**


Entrez votre nom d'utilisateur (tout en minuscule) et votre mot de passe et cliquez sur Connexion.

Nom d'utilisateur:

\_\_\_\_\_

Mot de passe:

\_\_\_\_\_

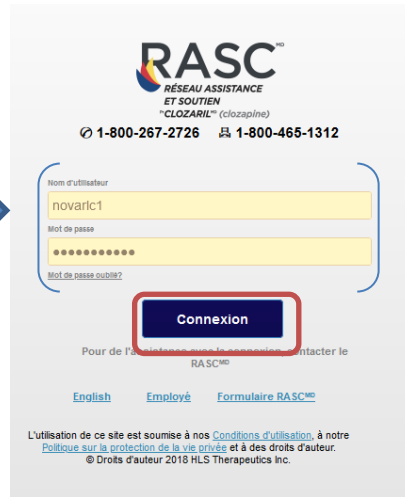

Le RASC<sup>MD</sup> disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7

**3 EFFECTUER UNE ANALYSE RASC<sup>MD</sup> PRONTO<sup>MD</sup>**

- Assurez-vous d'insérer l'extrémité magnétique de la bandelette d'analyse en premier dans le dispositif RASC<sup>MD</sup> Pronto<sup>MD</sup> et que l'encoche en « V » soit positionnée vers le haut. Référez-vous aux figures 4.1 and 4.2 ci-dessous.
- Remarque : Si la bandelette d'analyse n'est pas insérée correctement (c.-à-d., pas entrée complètement), le système le détectera et émettra un avertissement. La lumière LED tournera au bleu lorsqu'elle sera correctement insérée. Par la suite, sélectionnez et complétez les étapes de préparation sur le portail: sélection de l'analyse, informations sur le prescripteur, informations sur l'appareil et la bandelette.
- Une fois que la feuille d'instructions en ligne apparaît et que la bandelette de test est correctement insérée, cliquez sur <Exécutez l'analyse>
- La lumière LED de l'appareil deviendra blanche et commencera à créer une image. Lorsque le test RASC<sup>MD</sup> Pronto<sup>MD</sup> sera terminé, la bandelette réactive reviendra dans sa position d'origine et vous pourrez la retirer. Une fois l'imagerie terminée, le système calculera les valeurs et les résultats seront affichés à l'écran. Cliquez sur <Imprimer le résultat> si nécessaire, puis sur <Terminer>.
- Chaque bandelette de test est à usage unique. Jeter la bandelette réactive et la lancette usagées dans un collecteur d'objets tranchants.

4.1 Assurez-vous d'insérer l'extrémité magnétique de la bandelette d'analyse en premier dans le dispositif RASC<sup>MD</sup> Pronto<sup>MD</sup>



le triangle soit positionné vers le haut

4.2

